

Инструкция по применению ортопедических полимерных шин INTRARICH SPLINT

1. Наденьте защитные перчатки.
2. Откройте герметичную фольгированную упаковку с шиной непосредственно перед наложением повязки.
3. Достаньте шину из упаковки и погрузите в воду комнатной температуры (20-25°С) на 10 секунд. Сожмите шину под водой двумя руками таким образом, чтобы вода полностью пропитала шину.
4. Извлеките шину из воды и отожмите один раз.
5. Обратите внимание, что время затвердевания шины составит примерно 4–5 минут. Теплая вода сокращает время схватывания, а холодная – продлевает.
6. Удалите излишки воды с шины при помощи сухого полотенца, чтобы пациент не испытывал дискомфорт в травмированной области.
7. Плотно приложите шину к травмированной конечности и сформируйте повязку, не допуская образования зазоров, чтобы повязка плотно обхватывала и фиксировала конечность. Для данной цели плотно обмотайте конечность вместе с шиной эластичным бинтом, закрепите повязку и оставьте на несколько минут, пока шина не примет твёрдую форму.
8. После затвердевания шины, удалите эластичный бинт и закрепите шину эластичными ремешками, которые входят в комплект с шиной, с целью фиксации повязки.

Примечание: Данное изделие предназначено для использования медицинским персоналом.